

EASYPPOINT®

aiguille rétractable

- RÉTRACTATION AUTOMATIQUE DE L'AIGUILLE
- FACILE D'UTILISATION - NE NÉCESSITE QU'UNE FORMATION MINIME
- PEUT ÊTRE ACTIVÉE AVANT OU APRÈS RETRAIT DU PATIENT
- L'ACTIVATION PRÉALABLE AU RETRAIT RÉDUIT LES RISQUES D'EXPOSITION À L'AIGUILLE CONTAMINÉE
- L'ACTIVATION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE D'UN CERTAIN NOMBRE DE FAÇONS
- RÉDUIT RÉELLEMENT LES RISQUES DE BLESSURES PAR PIQÛRE D'AIGUILLE
- REBOUCHAGE IMPOSSIBLE APRÈS UTILISATION
- RESTE SÛRE LORS DE LA MISE AU REBUT

compatible avec les seringues à embout luer-lock et luer-slip (3 mL ou moins)



peut être utilisée avec des seringues préremplies



EASYPPOINT®

AIGUILLES RÉTRACTABLES

(50 par boîte/400 par carton)

Référence produit	Taille d'aiguille
82091	25G x 16 mm
82011	25G x 25 mm
82031	23G x 25 mm

AUTRES PRODUITS DE SÉCURITÉ DISPONIBLES

Seringue VanishPoint®

Porte-tubes de recueil de sang VanishPoint®

Kit de prélèvement sanguin VanishPoint®

Cathéter intraveineux VanishPoint®

Seringue Patient Safe®



511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068-5295

P+1•972•294•1770 TF+1•888•703•1010 F+1•972•294•4400

rtiservice@vanishpoint.com

© 2017 Copyright Retractable Technologies, Inc. Tous droits réservés.

M124 REV.0 FR, OCT 2017

NOUVELLES EASYPPOINT®

aiguille rétractable



FACILE D'UTILISATION

- changement minime de la technique d'injection
- permet l'activation avec une seule main
- **les mains et les doigts du praticien restent en retrait de l'aiguille souillée** à tout moment



1
Fixer l'aiguille EasyPoint sur n'importe quelle seringue à embout luer-lock ou luer-slip.* Administrer la substance médicamenteuse selon les recommandations en vigueur.




2
Pousser la languette colorée pour permettre à l'aiguille de se rétracter automatiquement dans la chambre de sécurité. **Ce dispositif est conçu pour être activé avant ou après avoir retiré l'aiguille du patient.**



3
Jeter dans un conteneur pour objets pointus, conformément au protocole de l'établissement.

*seringue de 3 mL ou moins

L'aiguille lubrifiée à triple biseau assure le confort du patient

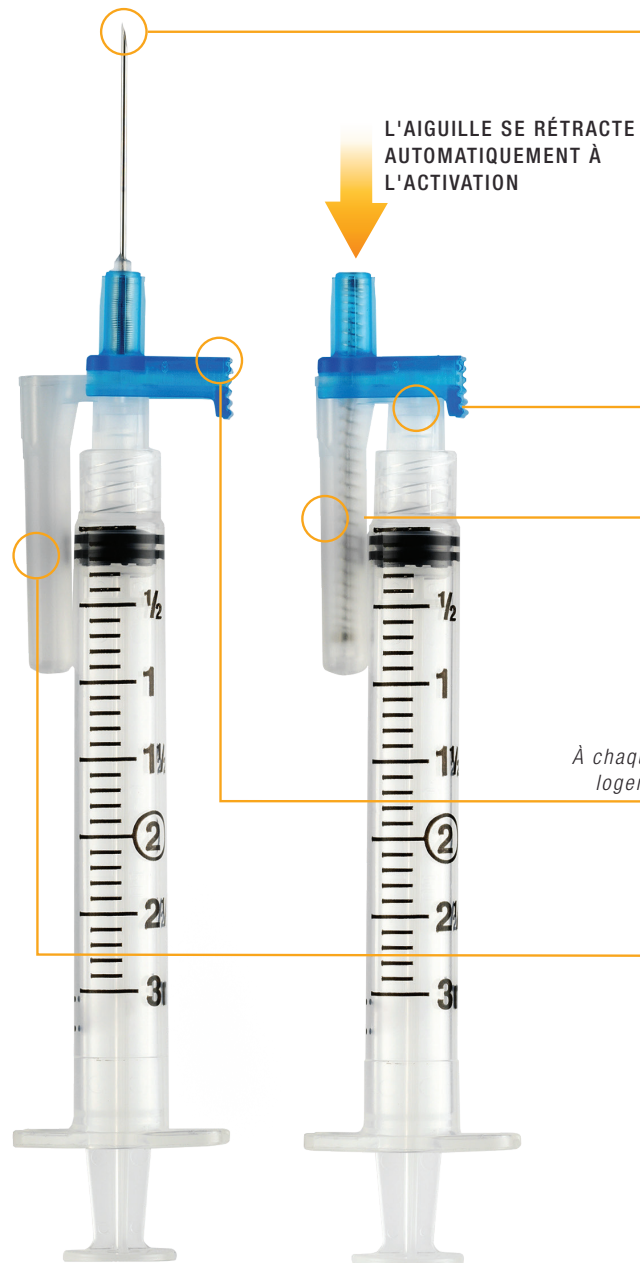

L'AIGUILLE SE RÉTRACTE
AUTOMATIQUEMENT À
L'ACTIVATION

L'embout standard luer permet un
raccord sûr et résistant aux fuites

Après rétractation, l'aiguille contaminée
est enfermée dans la chambre de
sécurité empêchant toute contamination

À chaque taille d'aiguille correspond une couleur de
logement et de languette d'activation de l'aiguille

La chambre de sécurité transparente et
compacte ne gêne pas pour l'injection

RÉTRACTATION AUTOMATIQUE
- désormais avec -
PLUS DE POLYVALENCE

EASYPOINT®