

Vorbeugung von Nadelstichen ganz gemäß Ihren Bedürfnissen



- ▶ Einwirkung wird nahezu vollständig beseitigt
- ▶ passive Aktivierung mit einer Hand
- ▶ Hände bleiben hinter dem scharfen Instrument
- ▶ integrierter Sicherheitsmechanismus
- ▶ verhindert das Wiederverschließen und Zurückziehen der Kanüle
- ▶ bleibt sicher bis zur Entsorgung
- ▶ einfach zu handhaben, geringer Schulungsbedarf
- ▶ sicher und effektiv für Patienten

Bestellnummer	Beschreibung
VanishPoint® U-100 Insulinspritzen 100 pro Karton/800 pro Behälter	
15291	0,5 mL VanishPoint Insulinspritze 30G x 5 mm NEU
15271	0,5 mL VanishPoint Insulinspritze 30G x 8 mm
15221	0,5 mL VanishPoint Insulinspritze 30G x 12,7 mm
10291	1 mL VanishPoint Insulinspritze 30G x 5 mm NEU
10271	1 mL VanishPoint Insulinspritze 30G x 8 mm
10281	1 mL VanishPoint Insulinspritze 29G x 8 mm
10211	1 mL VanishPoint Insulinspritze 29G x 12,7 mm
1 mL VanishPoint® Injektionsspritzen 100 pro Karton/800 pro Behälter	
10131	1 mL VanishPoint Tuberkulinspritze 27G x 12,7 mm
10151	1 mL VanishPoint Tuberkulinspritze 25G x 16 mm
10161	1 mL VanishPoint Injektionsspritze 25G x 25 mm

VanishPoint® Allergiespritzenschale 25 pro Schale/1000 pro Behälter	
10134	1 mL VanishPoint Allergiespritzen 27G x 12,7 mm

3 mL VanishPoint® Injektionsspritzen 100 pro Karton/600 pro Behälter	
13021	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 27G x 38 mm
10301	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 25G x 16 mm
10391	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 25G x 25 mm
13011	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 25G x 38 mm
10311	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 23G x 25 mm
10321	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 23G x 38 mm
10331	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 22G x 25 mm
10341	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 22G x 38 mm
10351	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 21G x 25 mm
10361	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 21G x 38 mm
10371	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 20G x 25 mm
10381	3 mL VanishPoint Injektionsspritze 20G x 38 mm

5 mL VanishPoint® Injektionsspritzen 100 pro Karton/600 pro Behälter

10 mL VanishPoint® Injektionsspritzen 100 pro Karton/600 pro Behälter

5 mL und 10 mL VanishPoint® Injektionsspritzen sind in mehreren Längen und Durchmessern erhältlich. Eine komplette Liste dieser Artikel finden Sie bei RTI oder besuchen Sie unsere Website auf www.retractable.com.



© 2013, 2016 Retractable Technologies, Inc.
Alle Rechte vorbehalten. M051 REV.2 GR, SEP 2016

511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-5295 USA
Tel.: +1 (972) 294-1770
Fax: +1 (972) 294-4400
Gebührenfrei: 1-888-703-1010
rtisales@vanishpoint.com

KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT FÜR ÄRZTE UND PATIENTEN



VANISHpoint
INJEKTIONSSPRITZEN

Der neue Standard für Sicherheit

VANISHPOINT® Sicherheit nach Design

Bei einer Studie, die die Wirksamkeit von passiven SED-Geräten (sicherheits-technische Geräte) mit der von aktiven SED-Geräten (wie z. B. die VanishPoint® Spritze) vergleicht, wurde herausgestellt, dass die Nadelstich-Verletzungsrate signifikant reduziert wurde.¹

Design mit befestigter Kanüle:

- hält ein geschlossenes System aufrecht
- verhindert Undichtigkeiten und Kontamination
- reduziert das Totraumvolumen
- verhindert unnötige Kanülenwechsel

"Das Wechseln von Kanülen zwischen dem Aufziehen von Impfstoffen aus einem Fläschchen und der Injektion in den Patienten ist unnötig."²

Sicher für Sie sowie für Ihre Patienten



¹A. J. Goris, et al., "Reducing Needlestick Injuries from Active Safety Devices: A Passive Safety-Engineered Device Trial," AOHJ Journal, vol. 34, no. 2 (Spring 2014), pp. 14-18.

²CDC (2002). General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the American Academy of Family Physicians (AAFP). MMWR 51(RR02):1-36.

1

Bei dem Aufziehen von Medikamenten die Standardtechnik anwenden.



2

Unter Anwendung der in der Einrichtung üblichen aseptischen Technik Injektionsstelle auswählen und vorbereiten.



3

Drücken Sie den Druckknopf vollständig ein, um den Kanüleneinzug zu aktivieren, während die Kanüle noch im Patienten ist.




4

Die VanishPoint® Injektionsspritze in einem geeigneten Kanülenabwurfbehälter entsorgen.



Der **VANISHPOINT**® **VORTEIL** Effektive Sicherheit durch automatisierte Retraktionstechnologie

Klare, ungehinderte Graduierung ermöglicht eine akkurate Dosierung

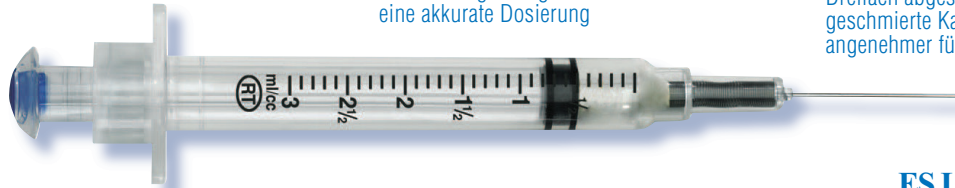

Dreifach abgeschrägte, geschmierte Kanülen sind angenehmer für den Patienten

EINFACHE, EINHÄNDIGE AKTIVIERUNG

ES LIEGT KEIN KONTAMINIERTES SCHARFES INSTRUMENT FREI



Die Kanüle wird direkt aus dem Patienten in die Spritze eingezogen

Eine Aktivierung vor der Entfernung verhindert den Kontakt mit kontaminierten scharfen Instrumenten




Insulinspritzen VanishPoint®
JETZT MIT
5-mm-Nadeln und
8-mm-Nadeln




Aktivierte Injektionsspritzen VanishPoint® nehmen weniger Entsorgungsplatz in Anspruch als andere Sicherheitsspritzen und verhindern entsorgungsbedingte Verletzungen.

Weitere erhältliche Sicherheitsprodukte

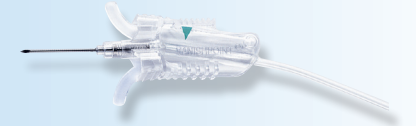

VanishPoint® Blutabnahmeset

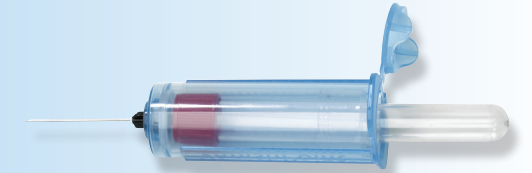

VanishPoint® Blutentnahmeröhrchenhalter



VanishPoint® IV-Katheter



Patient Safe® Injektionsspritze