




Cateter I.V.

Informações de Uso do Produto:

- Seleccionar e preparar o local usando uma técnica asséptica de acordo com as directrizes institucionais. Para desinfetar o local da perfusão use uma solução antisséptica, observando sempre o histórico sobre reações alérgicas do paciente. Soluções recomendadas: 2% clorexidina, 10% iodopovidone, 70% álcool.
 - Remover a cobertura da agulha e inspeccionar a unidade do cateter.
1. Realize a punção venosa, observando o retorno do sangue. Avance ligeiramente o cateter para assegurar a completa introdução do cateter na veia.
 2. Mantendo a câmara de retorno estacionária, desengate o encaixe da agulha e avance o cateter na veia. **NÃO VOLTAR A INSERIR A AGULHA NO CATETER.**
 3. **Antes de retirar a agulha do cateter**, comprima a extremidade colorida do reservatório da agulha para ativar a retração automática da agulha. Para activar o mecanismo de retração utilizando uma mão, estabilizar a extremidade colorida do reservatório da agulha contra a parte proximal da mão, enquanto puxa para trás o revestimento utilizando os dedos.
 4. A agulha introdutória se retrairá para dentro do reservatório. Caso o mecanismo de retração não funcione, descarte o introdutor do cateter em um recipiente para instrumentos pontiagudos apropriado, de acordo com o protocolo da instituição. Não recoloca a tampa em agulhas contaminadas
- Descarte a agulha introdutora em um recipiente apropriado para instrumentos pontiagudos de acordo com o protocolo da sua instituição.
 - De forma segura, ligar o tubo ou adaptador ao encaixe do cateter, seguindo as instruções do fabricante do dispositivo.
 - Prenda o cateter e curativo de acordo com o protocolo da instituição.

Precauções:

- Somente para uso-único. A reutilização deste dispositivo pode ter como consequência a transmissão de patógenos pelo sangue, abrangendo o vírus da hepatite B (HBV), o vírus da hepatite C (HCV) e o vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- Não use se o produto ou a embalagem estiverem danificados.
- Não é fabricado com látex de borracha natural.
- Para evitar a exposição da agulha contaminada, activar o mecanismo de segurança antes de retirar a agulhado cateter.
- Não utilizar tesouras ou acessórios afiados perto dos cateteres I.V.
- Nunca voltar a inserir a agulha no cateter.
- Os clínicos têm de seguir as instruções e ter formação sobre a utilização adequada do produto.
- Durante a inserção, manutenção, troca e remoção do cateter, siga as orientações “Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections” (Orientações sobre a prevenção de infecções relativas a cateteres intravasculares), Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, EUA.
- Caso os pacientes apresentem sintomas de complicações relacionadas ao sistema de infusão, informe o médico imediatamente e siga os protocolos da instituição.

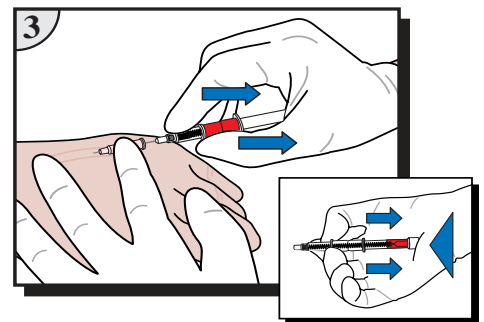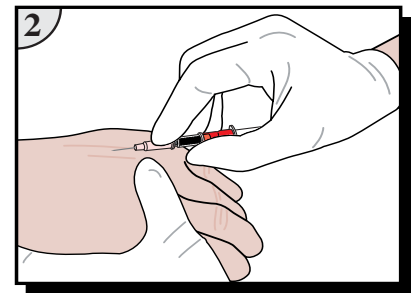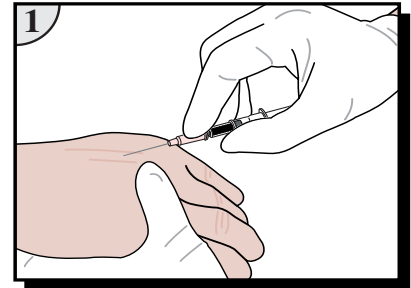

Vista a partir da parte inferior da palma

