


Porte-tubes de recueil de sang

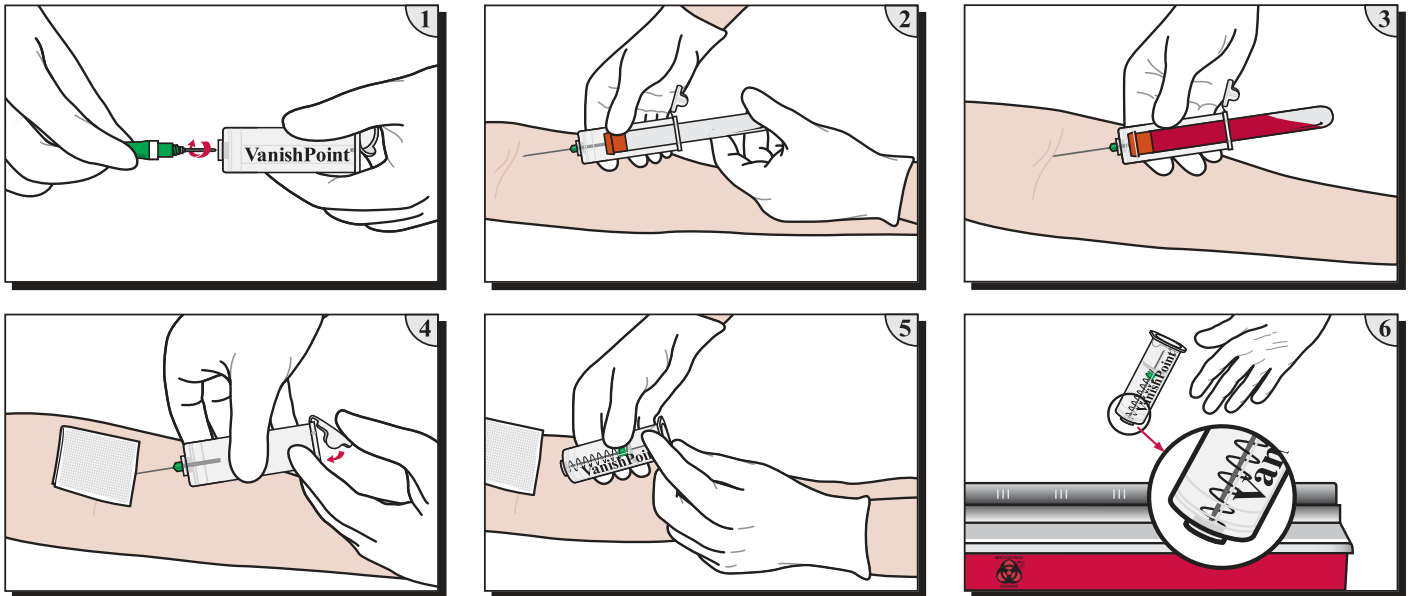

Informations relatives à l'utilisation du produit:

1. Bien introduire l'aiguille à multiprélèvements sanguins dans le porte-tubes. Retirer le cache de l'aiguille au moment de l'emploi.
2. Effectuer la ponction veineuse conformément au protocole de l'établissement.
3. Introduire le tube de prélèvement sanguin dans le porte-tubes en le poussant afin que l'écoulement du sang commence. Retirer le tube une fois rempli. Le cas échéant, répéter la procédure pour les tubes supplémentaires. Pour les tubes de petit diamètre, utiliser l'Adaptateur pour tubes de petit diamètre VanishPoint® avec le porte-tubes.
4. Une fois le dernier tube retiré, ***l'aiguille se trouvant toujours dans la veine du patient***, remettre le capuchon en place sur le porte-tubes.
5. L'aiguille se rétracte automatiquement hors de la veine du patient et rentre dans le porte-tubes. Si le mécanisme de rétraction de l'aiguille ne s'active pas, jeter le support de tube dans un conteneur pour objets pointus approprié conformément au protocole de l'établissement. Ne pas remettre de bouchon sur les aiguilles contaminées.
6. Mettre le porte-tubes au rebut dans un récipient approprié aux instruments pointus conformément au protocole de l'établissement.

Précautions:

- À usage unique. La réutilisation de ce dispositif peut provoquer une exposition à des pathogènes sanguins, y compris au virus de l'hépatite B (VHB), au virus de l'hépatite C (VHC) et au virus d'immunodéficience humaine (VIH).
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
- À utiliser uniquement avec des aiguilles à multiprélèvements sanguins classiques d'une longueur maximale de 38 mm.
- Ne pas utiliser avec des jeux d'aiguilles à ailettes ni avec des adaptateurs luer.
- Ne pas essayer de retirer l'aiguille de prélèvement sanguin du porte-tubes après sa rétraction.