

A prevenção de acidentes com agulhas que satisfaz as suas necessidades



- ▶ **reduz exposições à agulhas contaminadas**
- ▶ **permite ativação com uma só mão**
- ▶ **mecanismo integrado de segurança**
- ▶ **uma vez ativada, a agulha se retrai com segurança para o descarte**
- ▶ **fácil de usar**

**OS CATETERES I.V. VANISHPOINT®
SÃO SEGUROS E EFICAZES**

Cateteres I.V. VanishPoint® 50 por caixa/200 por estojo

Nº Catálogo	Calibre	Comprimento	Material do Cateter	Cor Código
31221	24	19 mm	Radiopaco PUR	Amarelo
35221	24	19 mm	Radiopaco FEP	Amarelo
31331	22	25 mm	Radiopaco PUR	Azul
35331	22	25 mm	Radiopaco FEP	Azul
31441	20	32 mm	Radiopaco PUR	Rosa
35441	20	32 mm	Radiopaco FEP	Rosa
31541	18	32 mm	Radiopaco PUR	Verde
35541	18	32 mm	Radiopaco FEP	Verde
31641	16	32 mm	Radiopaco PUR	Cinza
35641	16	32 mm	Radiopaco FEP	Cinza
31741	14	32 mm	Radiopaco PUR	Laranja
35741	14	32 mm	Radiopaco FEP	Laranja

Cateteres I.V. com calibre 18 a 24 são adequados para uso com bombas injetoras a até 325 psi

Outros Produtos de Segurança



Conjunto de coleta de sangue VanishPoint®



Seringa Patient Safe®



Porta-tubos de Recolha de Sangue VanishPoint®



Seringa VanishPoint®



© 2008, 2016 Retractable Technologies, Inc.
Todos os direitos reservados. M029 REV.4 PT. JUN 2016

511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-5295 EUA
Tel.: +1 (972) 294-1770
Fax: +1 (972) 294-4400

Ligação gratuita nos EUA: 1-888-703-1010
rtisales@vanishpoint.com

COMPLETA SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES



VANISHpoint®
CATETER I.V.

O novo parão de segurança

1
Realize a punção venosa, observando o retorno do sangue. Avance ligeiramente o cateter para assegurar a completa introdução do cateter na veia.



2
Mantendo a câmara de retorno estacionária, desengate o encaixe da agulha e avance o cateter na veia.



3
Antes de retirar a agulha do cateter, comprima a extremidade colorida do reservatório da agulha para ativar a retração automática da agulha.



4
A agulha introdutória se retrairá para dentro do reservatório. Descarte a agulha introdutória em um coletor adequado para perfurocortantes.



AS VANTAGENS DE VANISHPOINT®


O cateter I.V. seguro com retração automática patenteada pela VanishPoint®!



Os cateteres I.V. VanishPoint® estão disponíveis em vários comprimentos e calibres


O apoio de dedos e o tubo da agulha transparentes proporcionam facilidade de manuseio e visualização do fluxo do sangue

As tampas flip facilitam a introdução com uma só mão e indicam a orientação do bisel

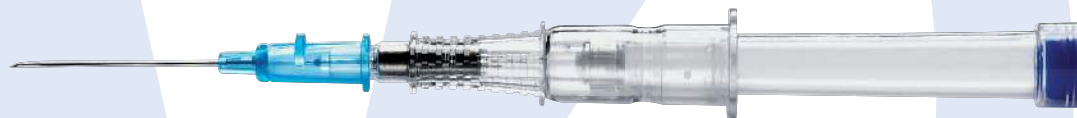

Bisel de agulha com afiação precisa, facilitando a inserção com conforto ao paciente

Coloração do canhão da agulha e base do tubo transparente compatível com comprimento e calibre do cateter

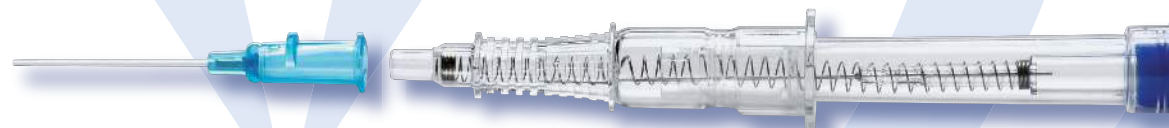

A agulha se retrai automaticamente com uma leve compressão por detrás do tubo transparente. Uma vez ativada, a agulha se retrai com segurança para o interior do tubo transparente, prevenindo acidentes com perfurocortantes