

Prevención contra pinchazos de aguja que se ajusta a sus necesidades



- ▶ prácticamente elimina la exposición
- ▶ activación pasiva con una sola mano
- ▶ las manos permanecen detrás de la aguja
- ▶ mecanismo de seguridad integrado
- ▶ evita que se vuelva a tapar o que se extraiga la aguja
- ▶ sigue siendo segura después de su desecho
- ▶ fácil de usar, requiere un entrenamiento mínimo
- ▶ segura y efectiva para los pacientes

Número de catálogo Descripción

Jeringas para insulina VanishPoint® U-100 100 por caja/800 por estuche		
15291	VanishPoint Jeringa para insulina de 0,5 mL	30G x 5 mm NUEVO
15271	VanishPoint Jeringa para insulina de 0,5 mL	30G x 8 mm
15221	VanishPoint Jeringa para insulina de 0,5 mL	30G x 12,7 mm
10291	VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL	30G x 5 mm NUEVO
10271	VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL	30G x 8 mm
10281	VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL	29G x 8 mm
10211	VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL	29G x 12,7 mm

Jeringas VanishPoint® de 1 mL 100 por caja/800 por estuche		
10131	VanishPoint Jeringa para tuberculina de 1 mL	27G x 12,7 mm
10151	VanishPoint Jeringa para tuberculina de 1 mL	25G x 16 mm
10161	Jeringa VanishPoint de 1 mL	25G x 25 mm

Bandeja de jeringas para pruebas de alergia VanishPoint®		
25 por bandeja/1000 por estuche		
10134	Jeringas para pruebas de alergia VanishPoint de 1 mL	27G x 12,7 mm

Jeringas VanishPoint® de 3 mL 100 por caja/600 por estuche		
13021	Jeringa VanishPoint de 3 mL	27G x 38 mm
10301	Jeringa VanishPoint de 3 mL	25G x 16 mm
10391	Jeringa VanishPoint de 3 mL	25G x 25 mm
13011	Jeringa VanishPoint de 3 mL	25G x 38 mm
10311	Jeringa VanishPoint de 3 mL	23G x 25 mm
10321	Jeringa VanishPoint de 3 mL	23G x 38 mm
10331	Jeringa VanishPoint de 3 mL	22G x 25 mm
10341	Jeringa VanishPoint de 3 mL	22G x 38 mm
10351	Jeringa VanishPoint de 3 mL	21G x 25 mm
10361	Jeringa VanishPoint de 3 mL	21G x 38 mm
10371	Jeringa VanishPoint de 3 mL	20G x 25 mm
10381	Jeringa VanishPoint de 3 mL	20G x 38 mm

Jeringas VanishPoint® de 5 mL 100 por caja/600 por estuche

Jeringas VanishPoint® de 10 mL 100 por caja/600 por estuche

Las jeringas VanishPoint® de 5 mL y 10 mL están disponibles con una variedad de calibres y longitudes de agujas. Para obtener una lista completa, comuníquese con RTI o visite nuestro sitio web en www.retractable.com.



© 2008, 2016 Retractable Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. M023 REV.2 SP, SEP 2016

511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-5295 EE. UU.
Tel.: +1 (972) 294-1770
Fax: +1 (972) 294-4400
Llamada gratuita: 1-888-703-1010
rtisales@vanishpoint.com

SEGURIDAD TOTAL PARA EL PROFESIONAL CLÍNICO Y SUS PACIENTES



VANISHpoint®
JERINGAS

El standard nuevo para la seguridad

VANISHPOINT®
Seguridad a través del diseño

Un estudio que comparó la eficacia de los dispositivos SED (con características de seguridad) *pasivos* con la de los SED *activos*, concluyó que los SED pasivos (como la jeringa VanishPoint®) redujeron considerablemente el índice de lesiones por pinchazos con agujas.¹

Diseño de la aguja incorporada:

- mantiene un sistema cerrado
- evita la contaminación y las fugas
- ocupa menos espacio
- evita cambios de aguja innecesarios

"El cambio de agujas cuando se extrae la vacuna del vial y se inyecta a un receptor es innecesario."²

Seguridad para usted y sus pacientes



¹A. J. Goris, et al., "Reducing Needlestick Injuries from Active Safety Devices: A Passive Safety-Engineered Device Trial," AOHJ Journal, vol. 34, no. 2 (Spring 2014), pp. 14-18.

²CDC (2002). General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the American Academy of Family Physicians (AAFP). MMWR 51(RR02):1-36.

1

Utilice el procedimiento estándar para extraer el medicamento.



2

Prepare y administre la inyección utilizando una técnica aséptica según la política institucional.



3

Mientras la aguja todavía se encuentre en el paciente, oprima el émbolo a fondo para activar el mecanismo de retracción.



4


Deseche la jeringa VanishPoint® en un contenedor apropiado para objetos punzocortantes.



La **ventaja de** VANISHPOINT®

Seguridad efectiva con tecnología de retracción automática

La escala transparente y sin obstrucciones permite una dosificación precisa

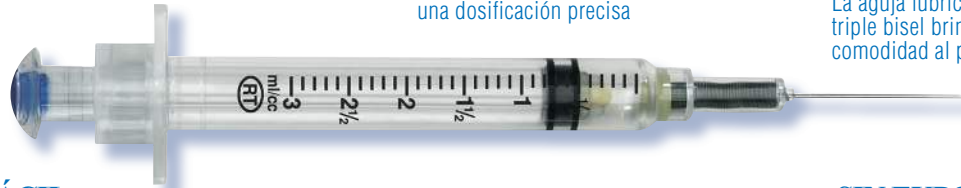

La aguja lubricada y con triple bisel brinda comodidad al paciente

ACTIVACIÓN FÁCIL CON UNA SOLA MANO

SIN EXPOSICIÓN DEL OBJETO PUNZANTE CONTAMINADO



La aguja se retrae directamente del paciente hacia la jeringa

La activación anterior a la extracción evita la exposición al objeto punzante contaminado



Las jeringas de insulina VanishPoint® **YA ESTÁN DISPONIBLES CON** agujas de 5mm y de 8mm




Las jeringas activadas VanishPoint® requieren de menos espacio que otras jeringas al desecharlas y evitan lesiones relacionadas con su desecho.


Otros productos de seguridad disponibles



Set de extracción de sangre VanishPoint®

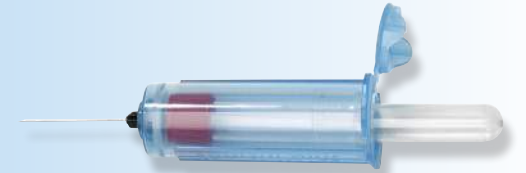

Porta-tubo para muestras sanguíneas VanishPoint®

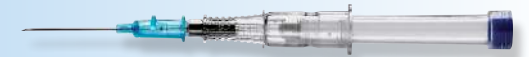

Catéter I.V. VanishPoint®



Jeringa Patient Safe®