


Jeringa

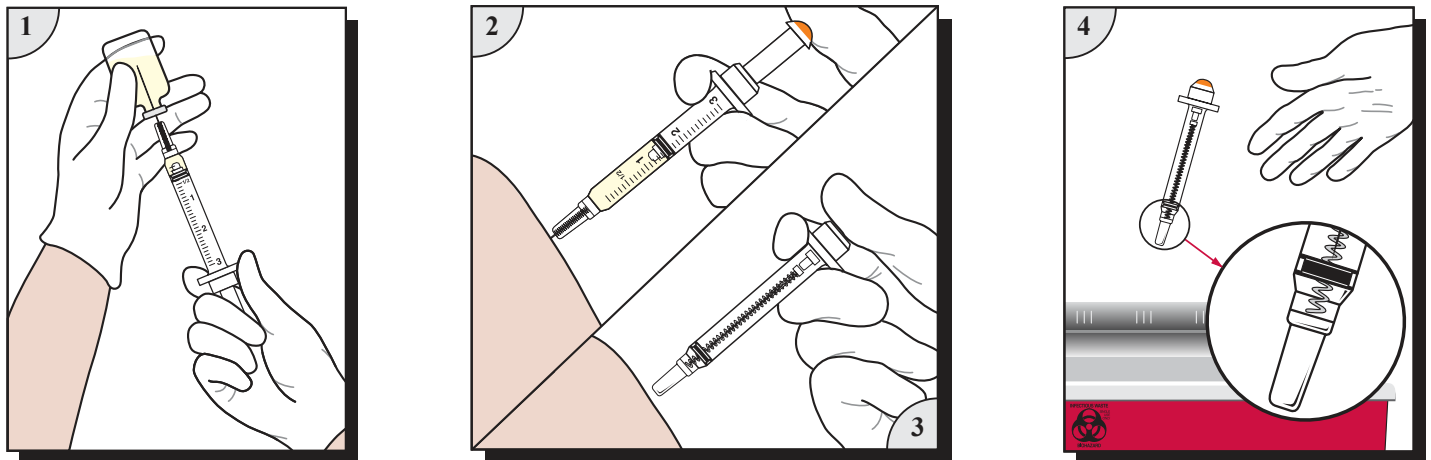

Información de uso del producto:

1. Prepare e inyecte usando técnica aséptica de acuerdo con las prácticas habituales del establecimiento.
2. Para inyectar en el paciente, continúe oprimiendo el émbolo para activar la retracción automática de la aguja ***mientras ésta todavía se encuentre en el paciente***. Para inyectar en orificios intravenosos, continúe oprimiendo el émbolo para activar la retracción automática de la aguja y ***retire de inmediato la aguja del orificio***. ***La dosis completa sólo se administra cuando se activa la retracción de la aguja***.
3. La aguja se retraerá automáticamente al interior de la jeringa e impedirá la exposición a la aguja contaminada y la reutilización de la jeringa. Si el mecanismo de retracción de la aguja no se activa, elimine la jeringa en un contenedor para objetos cortantes de acuerdo con el protocolo de la institución. No tape nuevamente las agujas contaminadas.
4. Deseche la jeringa VanishPoint® en un recipiente para objetos cortantes adecuado de acuerdo con las prácticas habituales del establecimiento.

Precauciones:

- Para uso único. Si reutiliza este dispositivo puede exponer a las personas a patógenos sanguíneos, entre ellos el virus de la Hepatitis B (VHB), el virus de la Hepatitis C (VHC) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- El contenido es estéril, no tóxico y no pirógeno. No utilice el producto si éste o el envase está dañado.
- No está hecho con látex de caucho natural.
- Utilice únicamente con la aguja ya instalada. No es posible cambiar la aguja.
- La retracción automática de la aguja sólo tiene lugar cuando se vacía el cuerpo y se oprime a fondo el émbolo.
- Para aplicaciones en las que no se administra todo el contenido, expulse el contenido restante y active la retracción de la aguja.

